


Descripción de la pantalla

- 1- Temperatura medida
- 2- Modo de temperatura frontal
- 3- Modo de temperatura auricular
- 4- Modo de temperatura ambiente/o
- 5- Modo bebé
- 6- Grados Celsius o Fahrenheit
- 7- Toma de temperatura con/sin boqui
- 8- Almacenamiento en memoria
- 9- Modo silencioso
- 10- Estado de carga de las pilas

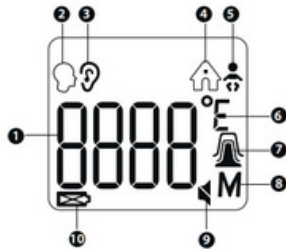


Cómo utilizar el termómetro ABBICARE

Compruebe que las pilas suministradas están correctamente insertadas en el compartimento (nº 9 en la imagen).

Modo de toma de temperatura en la frente

Coloque el termómetro en el centro de la frente. Pulse el botón de medición (nº5 en la imagen) mientras desliza el termómetro a lo largo de la frente hasta llegar a la sien. Cuando suelte el botón, sonará un pitido que confirma que se ha tomado la temperatura.

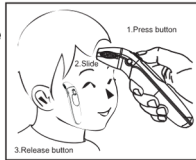

Nota: la temperatura tomada en modo frontal es indicativa. Puede desviarse alrededor de medio grado centígrado con respecto a la temperatura corporal real. Hay varios factores que influyen en la precisión de la medición. Consulte la sección «**Consejos para tomar la temperatura**» para acceder a consejos sobre el manejo óptimo del aparato.


La frente debe estar limpia. Puede ser necesario limpiarla, pero en todo caso debe estar libre de suciedad o sudor. Por favor, compruebe igualmente la limpieza de la sonda (nº7 en la imagen) antes de cada uso.

⚠ El termómetro **ABBICARE™** y la persona a la que se le va a tomar la temperatura deben estar en la misma habitación con un mínimo de media hora de antelación.

Modo de toma de temperatura en el oído

Retire la tapa o cobertura del termómetro (nº1 en la imagen). Introduzca la sonda en el canal auditivo. Pulse el botón (nº5 en la imagen). Sonará un pitido y la lectura de la temperatura aparecerá en la pantalla.

⚠ El oído debe estar limpio antes de realizar la medición. Hay una diferencia en la temperatura según se tome en el oído derecho y el izquierdo. Por consiguiente, le recomendamos que realice siempre la medición en el mismo oído.

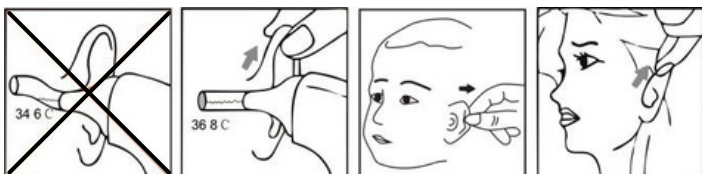

Como se muestra en estas imágenes, tire de la oreja hacia arriba y hacia atrás (para adultos y niños mayores de 1 año) para poder tomar la medición directamente en el tímpano.

- ⚠ Introduzca suavemente la sonda en el conducto auditivo para evitar dañar el termómetro o lesionar a la persona.
- ⚠ Tome las precauciones necesarias con los niños. Su canal auditivo es más pequeño que el de un adulto.

Modo de toma de temperatura de ambiente u objeto

Con el termómetro en posición de apagado, mantenga pulsado el botón de ajuste (nº 3 en la imagen) durante 3 segundos hasta que aparezca el icono (🏠) en la pantalla. Acto seguido, coloque el termómetro a una distancia de entre 1 y 5 cm del objeto, pulse el botón de medición (nº 5 en la imagen). Sonará un pitido y la medición se visualizará en la pantalla.



Modo bebé

Este modo está adaptado para tomar la temperatura a bebés de entre 3 y 36 meses. Basta con pulsar el botón de modo bebé (nº4 en la imagen) al encender el termómetro **ABBICARE™**.

Después de cada medición

Después de cada uso, la sonda (nº7 en la imagen) debe limpiarse con un paño suave o un bastoncillo de algodón empapado en alcohol. Luego, debería esperar al menos 10 minutos antes de realizar una nueva medición.

⚠ Puesto que el termómetro **ABBICARE™** es sensible a la temperatura ambiente, evite manipularlo durante mucho rato para no distorsionar la medición.

Después de cada medición, puede utilizar el modo de memoria para ver las lecturas anteriores.

Modo memoria (hasta 35 registros)

Con el termómetro apagado, pulse brevemente el botón de ajuste (nº 3 en la imagen) para pasar al modo de memoria. Pulse de nuevo este botón para desplazarse por las distintas mediciones registradas. Si no se hay ningún dato almacenado, aparecerá el símbolo "—M" en la pantalla.

Modo silencioso

Para cambiar de un modo a otro (no silencioso/silencioso), encienda el termómetro y, a continuación, mantenga pulsado el botón de ajuste durante (nº 3 en la imagen) durante 2 ó 3 segundos durante dos o tres segundos.



Celsius o Fahrenheit

Con el termómetro encendido, pulse brevemente el botón de ajuste (nº 3 en la imagen) para convertir la medición a grados Centígrados o Fahrenheit.

Lectura de la temperatura medida

Después de una medición, la temperatura se mostrará en la pantalla LCD en 3 colores posibles:

Sin fiebre	Fiebre ligera	Fiebre alta
Entre 32 y 37,3°C	Entre 37,4 y 37,9°C	Entre 38 y 42,9°C
pitido largo	3 pitidos cortos	5 pitidos cortos
+0,5°C rectal	+0,5°C rectal	+0,5°C rectal

Ajuste de la temperatura

Para pasar al modo ajuste encienda el termómetro y pulse simultáneamente el botón de ajuste (nº3 en la imagen) y el botón modo bebé (nº4 en la imagen) durante 5 segundos. Pulse de nuevo el botón de ajuste (nº3 en la imagen) para seleccionar la desviación con respecto a la temperatura deseada: hasta un valor de más o menos 2 grados.

No olvide reajustar el termómetro a más o menos 0 grados para anular cualquier cambio.

Apagado del termómetro

Tras 10 segundos de inactividad, el termómetro se apaga automáticamente. Alternativamente, pulsando entre 5 y 7 segundos el botón de medición (nº5 en la imagen), se activa el modo apagado.

⚠ Atención:

Si retira las pilas, los datos registrados se borrarán por completo. Todos los ajustes del termómetro se restablecerán a sus valores por defecto.

Cambio de pilas

Retire la tapa del compartimento (véase 9) e inserte 2 pilas AAA en el sentido indicado.

Si no va a utilizar el termómetro durante un largo periodo de tiempo le aconsejamos que retire las pilas.

Consejos para la toma de temperatura

La forma más precisa de diagnosticar la presencia de fiebre es conocer la temperatura de la persona en circunstancias normales. Lo ideal es tomar la temperatura dos veces al día: a primera hora de la mañana y a última hora de la tarde. Es aconsejable tomar la temperatura siempre en el mismo lugar para evitar lecturas diferentes.

*Cuando se toma la temperatura en modo rectal hay una diferencia de 0,5 °C Si utiliza nuestro termómetro **ABBICARE™** principalmente en modo frontal, puede ajustar el resultado (véase el punto n° 10) para obtener el mismo resultado que con una medición recta.*

Hay diversos factores externos que pueden influir en los resultados obtenidos en modo oído. Por ejemplo:

- Cubrirse las orejas antes de realizar una medición
- Acostarse sobre un lado de la cabeza
- Estar expuesto a temperaturas muy calientes o frías
- Tomarse la temperatura después de un baño o de una sesión de natación.

En estos casos, es mejor esperar al menos 20 minutos antes de tomarse la temperatura.

⚠ No tome la temperatura en un oído tratado (con presencia de líquido en el canal auditivo)

No es aconsejable sostener el termómetro en la mano antes de utilizarlo, para evitar una lectura más alta. Se suministra una funda para guardar el termómetro y mantenerlo en reserva entre 2 mediciones.


Es recomendable permanecer en un estado estable en la misma habitación durante al menos 30 minutos antes de manipular el termómetro y medir la temperatura.

En las situaciones que se enumeran a continuación, es aconsejable realizar entre 3 y 5 mediciones en el mismo lugar y conservar la más alta como referencia:

- en los primeros 100 días de vida del recién nacido
- en lactantes menores de 3 años con un sistema inmunitario debilitado
- al utilizar el termómetro por primera vez, afin de familiarizarse con su manejo

Mantenimiento y limpieza

Utilice un hisopo o bastoncillo de algodón empapado en alcohol de 70° para limpiar el estuche el sensor y la sonda. Luego déjelo secar antes de manipularlo o tomar mediciones.

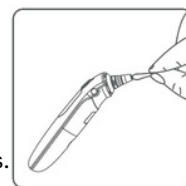

⚠ No debe entrar líquido alguno en el interior del termómetro. Del mismo modo, está terminantemente prohibido el uso de productos abrasivos, diluyente o benceno para su limpieza.

Por último, tenga cuidado de no rayar la superficie de la pantalla LCD.

Garantía y servicio posventa

Nuestro termómetro **ABBICARE™** tiene una garantía de 12 meses contados a partir de la fecha de compra, en caso de daños naturales y no causados por el hombre.

La garantía no cubre las pilas, el embalaje o cualquier daño consecuencia de un mal uso.

Quedan excluidos de la garantía los siguientes fallos causados por el usuario:

- fallos debidos a desmontaje o modificación no autorizados.
- fallos debidos a caídas inesperadas durante el uso o el transporte.
- fallos debidos al incumplimiento de las instrucciones del manual de uso.

Contacto: boutiqueabkfrance@gmail.com

ABBICARE™
Essentiels®