


Descrizione dello schermo

- 1- Temperatura rilevata
- 2- Modalità presa temperatura frontale
- 3- Modalità presa temperatura auricolare
- 4- Modalità presa temperatura ambiente/oggetto
- 5- Modalità neonato
- 6- Gradi Celsius o Fahrenheit
- 7- Presa di temperatura con/senza imbuto
- 8- Memorizzazione
- 9- Modalità silenziosa
- 10- Livello di carica delle batterie

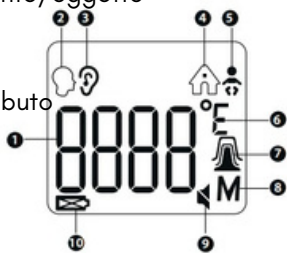


Come usare il termometro ABBICARE

Si prega di verificare che le batterie in dotazione siano posizionate correttamente nel vano (n°9 sull'immagine)

Modalità rilevazione temperatura frontale

Posizionare il termometro al centro della fronte. Premere il pulsante di rilevazione (n°5 sull'immagine) facendo scivolare lungo la fronte e fino alla tempia. Rilasciando il pulsante, viene emesso un segnale acustico a conferma della temperatura rilevata. **Nota bene:** la rilevazione della temperatura in modalità frontale è indicativa. Quest'ultima può differire di circa mezzo grado Celsius rispetto alla temperatura corporea effettiva. Sono diversi i fattori che possono influenzare la precisione della rilevazione della temperatura. Nel paragrafo « **Consigli per la misurazione della temperatura** » troverete delle indicazioni per una manipolazione ottimale.

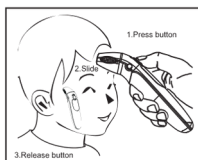


La fronte deve essere pulita. Può essere necessario pulirla in quanto deve risultare priva di qualsiasi residuo o sudore. Controllare che la sonda sia pulita prima di ogni utilizzo. (n°7 sull'immagine). ⚠ Il termometro **ABBICARE™** e la persona da misurare devono trovarsi nella stessa stanza almeno mezz'ora prima del rilevamento della temperatura.

Modalità di rilevazione della temperatura dell'orecchio

Rimuovere il coperchio del termometro (n. 1 nella figura). Inserire la sonda nel condotto uditivo. Premere il pulsante per rilevare la temperatura (n°5 nell'immagine). All'emissione del segnale acustico la temperatura apparirà sul display.

⚠ Prima di effettuare la misurazione l'orecchio deve essere pulito. Esiste una differenza di temperatura tra l'orecchio destro e quello sinistro. Consigliamo pertanto di effettuare la misurazione sempre nello stesso orecchio.

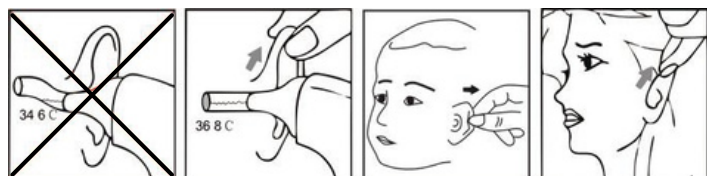

Come nelle immagini qui sopra, vi preghiamo di tirare l'orecchio verso l'alto e all'indietro (per gli adulti e i bambini con più di 1 anno) al fine di permettere una rilevazione della temperatura direttamente sul timpano.

⚠ Inserire delicatamente la sonda nel condotto uditivo per evitare di danneggiare il termometro o di ferire la persona.

⚠ Prendere le dovute precauzioni con i bambini. Il loro condotto uditivo è più piccolo di quello di un adulto.

Modalità presa temperatura ambiente o oggetto

Con il termometro in posizione off, premere il pulsante di impostazione (n. 3 nella figura) per 3 secondi finché sul display non compare l'icona (🏠). Posizionare quindi il termometro a una distanza compresa tra 1 a 5 cm dall'oggetto, premere il tasto di misurazione (n°5 nell'immagine). All'emissione del segnale acustico, la temperatura appare sullo schermo.



Modalità neonato

Questa modalità è adatta per rilevare la temperatura dei neonati di età compresa tra 0 e 36 mesi. È sufficiente premere il pulsante della modalità neonato (n°4 sull'immagine) quando si accende il termometro **ABBICARE™**.

Dopo ogni misurazione


Dopo ogni utilizzo, la sonda (n. 7 nell'immagine) deve essere pulita con un panno morbido o un cotton fioc imbevuto di alcol. Si consiglia di attendere almeno 10 minuti prima di effettuare una nuova misurazione. ⚠ Poiché il termometro **ABBICARE™** è sensibile alla temperatura ambiente, evitare di maneggiarlo a lungo per non falsare la rilevazione della temperatura. Dopo ogni rilevazione, è possibile utilizzare la modalità di memoria per consultare le precedenti misurazioni.

Modalità memoria (fino a 35 registrazioni)

A termometro spento, premere brevemente il pulsante di impostazione (n. 3 nella figura) per passare alla modalità di memoria. Premere nuovamente il pulsante per visualizzare le rilevazioni memorizzate. In assenza di dati memorizzati, sul display apparirà il simbolo "—M".

Modalità silenziosa

Per passare da una modalità all'altra (non silenzioso/silenzioso), accendere il termometro, quindi tenere premuto per 2 o 3 secondi il pulsante di impostazione (n. 3 nella figura) per due o tre secondi.

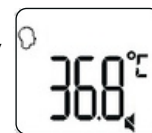

Celsius o Fahrenheit

Con il termometro acceso, premere brevemente il pulsante di impostazione (n. 3 nella figura) per convertire i gradi in Celsius o gradi Fahrenheit.

Letture della temperatura misurata

Dopo aver effettuato una misurazione, la temperatura viene visualizzata sullo schermo LCD in 3 possibili colori:

Nessuna febbre

Tra 32 e 37,3°C
segnale lungo
+0,5°C rettale

Febbre lieve

Tra 37,4 e 37,9°C
3 segnali brevi
+0,5°C rettale

Febbre alta

Tra 38 e 42,9°C
5 segnali brevi
+0,5°C rettale

Regolazione della temperatura

Con il termometro acceso, premere contemporaneamente il pulsante di impostazione (n°3 nell'immagine) e il pulsante della modalità bambino (n°4 nell'immagine) per 5 secondi per passare alla modalità di regolazione. Premere nuovamente il pulsante di regolazione (n. 3 nella figura) per selezionare la differenza di temperatura desiderata: fino a più o meno 2 gradi. **Ricordarsi di riaggiustare nuovamente su più o meno 0 gradi per annullare qualsiasi modifica.**

Spegnimento del termometro

Dopo 10 secondi di inattività, il termometro si spegne automaticamente. In alternativa, mantenendo premuto dai 5 ai 7 secondi il pulsante di misurazione (n°5 sull'immagine), la modalità spegnimento si attiva.

⚠ **Attenzione :**

In caso di rimozione delle pile, i dati registrati saranno completamente cancellati. Tutte le impostazioni del termometro verranno automaticamente reinizializzate in maniera predefinita.

Cambio delle batterie

Rimuovere il coperchio del compartimento (vedere n.9) e inserire 2 batterie AAA nella direzione indicata. Si consiglia di rimuovere le batterie in caso di lungo periodo di inattività.

Consigli per la misurazione della temperatura

Il modo più corretto per diagnosticare uno stato di febbre è conoscere la temperatura della persona in tempo normale. È meglio misurare la temperatura due volte al giorno: al mattino presto e nel tardo pomeriggio. Si raccomanda di misurare sempre la temperatura nello stesso punto per evitare di ottenere dati diversi.

Esiste una differenza di 0,5°C in meno sulla misurazione della temperatura con un termometro rettale. Se si utilizza il nostro termometro ABBICARE, soprattutto in modalità frontale, è possibile regolare il risultato (vedere rubrica n.10) al fine di ottenere lo stesso risultato di una misurazione rettale.

Diversi fattori esterni possono influenzare i risultati ottenuti con la modalità auricolare :

- Coprire le orecchie prima della misurazione
- Sdraiarsi su un lato della testa
- Essere esposti a temperature molto calde o, al contrario, molto fredde
- Misurare la temperatura dopo un bagno o dopo una sessione di nuoto

In questi casi, è meglio attendere almeno 20 minuti prima di misurare la temperatura.

⚠ Non effettuare la misurazione della temperatura su un orecchio trattato (con presenza di liquido nel canale uditivo).

Non è consigliabile tenere in mano il termometro prima dell'uso, al fine di evitare di ottenere un risultato più elevato. Una custodia è fornita in dotazione per riporlo o per una pausa tra le 2 rilevazioni.


Si raccomanda di rimanere in uno stato stabile e nella stessa stanza almeno 30 minuti prima di manipolare il termometro e misurare la temperatura.

Nelle situazioni seguenti raccomandiamo di effettuare da 3 a 5 misurazioni nello stesso punto e di tenere la più alta per riferimento:

- nei primi 100 giorni del neonato
- per un neonato di età inferiore a 3 anni con sistema immunitario indebolito
- durante il primo utilizzo del termometro, per fare pratica e familiarizzarsi

Manutenzione e pulizia

Utilizzare un tampone o un batuffolo di cotone imbevuto di alcool a 70° per pulire la scatola, il sensore e la sonda del termometro. Quindi lasciare asciugare prima di qualsiasi manipolazione o presa di misure.

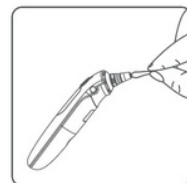

⚠ Nessun liquido deve penetrare all'interno del termometro. Sono severamente vietati i prodotti abrasivi, i diluenti o l'uso del benzene per la manutenzione. Fare attenzione a non graffiare la superficie dello schermo LCD.

Garanzia e servizio post-vendita

Il nostro termometro **ABBICARE™** è garantito per 12 mesi dalla data di acquisto, in caso di danni naturali e non di origine umana.

La garanzia non copre le batterie, l'imballaggio e qualsiasi danno causato dall'uso improprio.

I seguenti difetti, causati dall'utilizzatore, sono esclusi dalla garanzia :

- difetto dovuto a causa di uno smontaggio o di una modifica non autorizzati.
- difetto dovuto a caduta imprevista durante l'uso o il trasporto.
- difetto dovuto al mancato rispetto delle istruzioni del manuale d'uso.

Per contattarci : boutiqueabkfrance@gmail.com

ABBICARE™
Essentiels®